

NÁVOD K OBSLUZE



Čtyřkolové ocelové chodítko s loketní opěrkou


Kód výrobku: TGR-R RS 8811

1. Provedení

Čtyřkolové skládací chodítko s ocelovým rámem s práškovým lakem. Chodítko je vybaveno brzdami se zarážkou, sedátkem s odnímatelným tácem a košíkem. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými madly, loketní opěrkou a 8" plnými gumovými koly. Sada obsahuje: rám chodítka se sedátkem, dvě madla s brzdami, košík, tác, montážní svorky – 2 ks, zajišťovací svorky – 4 ks.

Součásti chodítka:

- a. madlo
- b. brzda
- c. bezpečnostní zarážka
- d. loketní opěrka
- e. spojovací prvek
- f. brzdové lanko
- g. montážní svorka

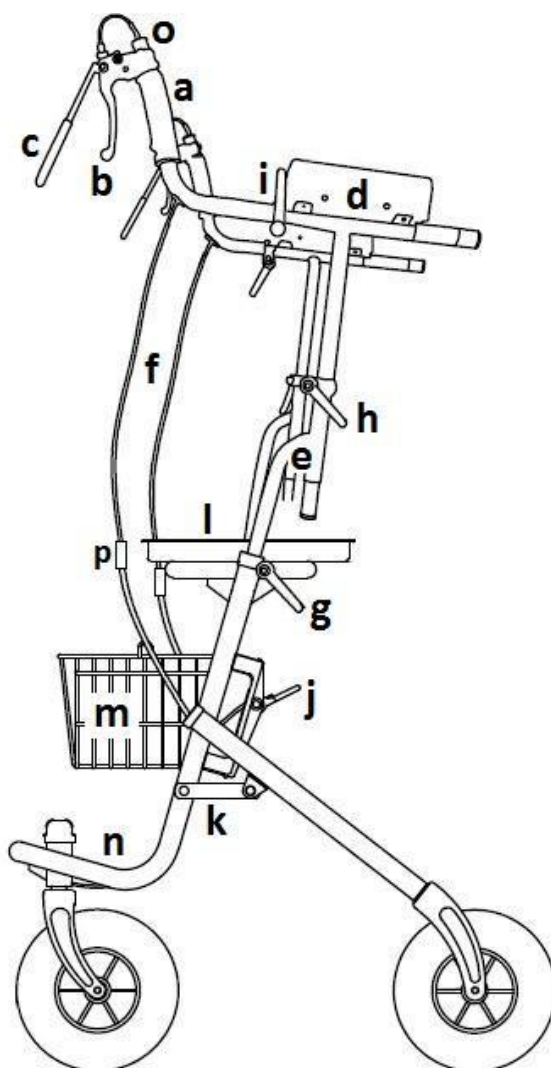

h. zajišťovací svorka

i. zajišťovací svorka

j. pojistka proti složení rámu

k. závěsný příčník

l. sedák

m. košík

n. držák na francouzské hole

o. horní nastavení brzdy

p. dolní nastavení brzdy

2. Použití

Čtyřkolové chodítko je pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují silnou oporu a jištění při chůzi. Chodítko je určeno hlavně pro pacienty s revmatickými změnami, omezenou hybností zápěstních a loketních kloubů a pro osoby se slabým úchopem. Je vhodné také pro seniory, kterým pomáhá udržovat rovnováhu, zlepšuje komfort při pohybu a chrání před pádem. Používání chodítka podporuje obnovení aktivity a vertikalizaci osob s pohybovými obtížemi. Zajišťuje lepší stabilitu, podporu a bezpečí při chůzi.

3. Montáž

Rozložení a složení chodítka

- Chodítko se skládá ze 4 dílů:

rám chodítka, spojovací prvek, loketní opěrka a madlo s brzdou.

- Nejprve nasadíte spojovací prvek (**e**) do montážních otvorů rámu a zajistíte ho montážními svorkami (**g**).
- Pak namontujete loketní opěrku (**d**) a upravte její výšku pomocí zajišťovacích svorek (**h**).
- Do montážních otvorů pod loketními opěrkami (**d**) nasadíte a nastavte madla s brzdami (**a**) pomocí zajišťovacích svorek (**i**).
- Chodítko rozložíte zatlačením na příčnou trubku pod sedátkem tak, aby se úplně rozložily závěsy (**k**) na venkovních stranách chodítka.
- Košík zavěste vpředu pod úroveň sedátka.
- Táč můžete namontovat na sedátko pomocí vsunutím držáků do montážních otvorů.
- Odstraňte plastové krytky kol.
- Při skládání chodítka pro dopravu nejprve chodítko zabrzdíte bezpečnostní brzdou silným zatažením páky k sobě. Pak současně stlačíte pojistku zabraňující složení chodítka (**j**), které je na pravé straně rámu, a zatáhněte nahoru za příčník. Můžete demontovat košík a táč.

Funkce brzd

- Konstrukce bezpečnostní brzdy umožňuje její použití, aniž by bylo potřeba pustit se madla, což podstatně zlepšuje bezpečnost



uživatele.

- Pokud chcete chodítko zastavit, zatáhněte za brzdovou páku k sobě k madlu a držte ji.
- Pokud zastavíte, nebo budete používat sedátko, zajistěte brzdu bezpečnostní zarážkou zatažením páky zarážky k sobě (červená páka).
- Pokud chcete brzdu odbrzdit, zatáhněte za páku bezpečnostní zarážky opačným směrem.

Nastavení výšky loketní opěrky

- Výšku loketní opěrky nastavíte tak, že odšroubujete zajišťovací svorky na vnější straně rámu, pak nastavíte požadovanou výšku a svorky znovu utáhnete.
- Vzdálenost madla nastavíte tak, že odšroubujete montážní svorku pod loketní opěrkou, nastavíte požadovanou vzdálenost a pak znovu zašroubujete montážní svorku. Madla nastavte ve stejné výšce.

Nastavení brzd

Horní nastavení brzdy: Odšroubujte držák lanka, natáhněte lanko na potřebnou délku a zajistěte zajišťovacím šroubem. **Dolní nastavení brzdy:** Plochým klíčem uvolněte upevňovací šroub, tažením upravte natažení černého lanka, pak utáhněte upevňovací šroub.

4. Technická specifikace

Šířka celkem	57 cm
Hloubka celkem	65 cm

Rozměry sedátka	38 cm x 16 cm
Výška sedátka nad podložkou	60 cm
Nastavení výšky madel	100-126,5 cm
Hmotnost	14,75 kg
Max. nosnost	135 kg
Max. nosnost košíku	12 kg

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenesse odpovědnost za nesprávné používání chodítka, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.










6. Údržba

- Rám chodítka čistěte vlhkým hadříkem a vždy ho důkladně osušte.
- Nepoužívejte silné lešticí prostředky, neboť tím může dojít k poškození ochranných nátěrů.
- Průběžně odstraňujte zašpinění pohyblivých dílů chodítka (závěsů, zajišťovacích šroubů, zajišťovacích prvků).

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů. Více informací je na www.timago.com

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021