

# NÁVOD K OBSLUZE



## Židle do sprchy s opěradlem a sedákem typu U – systém TF


Kód výrobku: TGR-R KP-U 3522

### 1. Provedení

Židle do sprchy sestává z hliníkového rámu a širokého sedáku z odolného PVC. Židle je vybavená výškově nastavitelnými nohama s pryžovými protiskluzovými koncovkami a bočními madly, které usnadňují používání této pomůcky. Speciálně vyvinuté pryžové koncovky na nohách účinně zabraňují klouzání na vlhkém povrchu. Židle je také vybavená systémem TF pro snadno montáž. **Obsah sady:** opěradlo – 1 ks, montážní trubky opěradla – 2 ks, sedák – 1 ks, trubky základny – 2 ks , výškově nastavitelné nohy – 4 ks, montážní šrouby (motýlkové) – 9 ks

### Součásti:

- a. opěradlo
- b. montážní trubky opěradla
- c. sedák
- d. trubky základny
- e. nastavení výšky – systém TF
- f. protiskluzové koncovky

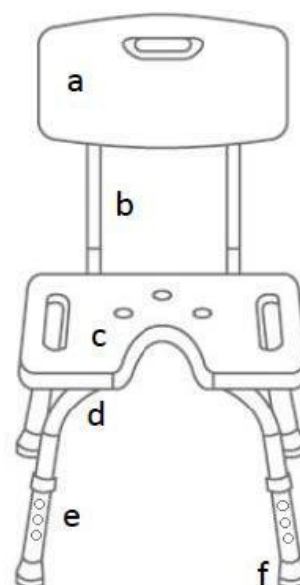

## 2. Použití

Židle do sprchy je pomůcka, která usnadňuje uživatelům provádění osobní hygieny. Je vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí, která jim znemožňuje nebo ztěžuje samostatné provádění běžných úkonů. Židle je vhodná pro používání ve sprše, ve vaně, koupelně a jiných vlhkých prostorech, doma i v nemocnici.

## 3. Montáž

**Krok 1.** Položte sedák na plochu na podložku.

**Krok 2.** Pak jedním motýlkovým šroubem s podložkou připevněte sedák uprostřed ke skříženým trubkám základny.

**Krok 3.** Trubky základny spojte s nohami.

**Krok 4.** Pak čtyřmi motýlkovými šrouby s podložkami přišroubujte trubky opěradla k trubkám základny.

**Krok 5.** Židli s namontovaným sedákem a trubkami opěradla postavte na nohy a připevněte opěradlo čtyřmi motýlkovými šrouby s podložkami.

## NASTAVENÍ VÝŠKY

- Výšku židle můžete nastavit tak, že stisknete kovový kolík, nastavíte potřebnou výšku nohy a pak polohu znovu zajistíte zajišťovacím kolíkem. Výška se nastavuje co 2,5 cm.

**Pozor!** Kolíky na všech nohách musí být nastaveny ve stejné výšce.

## 4. Technická specifikace

Šířka	48 cm
Hloubka	40 cm

Výška sedáku	35-52 cm
Výška celkem	70-87 cm
Rozměry sedáku	48 x 31 cm
Hmotnost	2,8 kg
Maximální nosnost	110 kg

## 5. Poznámky a doporučení

**Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání židle, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.**

## 6. Údržba

- Židli pravidelně čistěte vodou, houbou a šetrnými čisticími prostředky na umělé hmoty, např. mýdlem nebo jemnými čisticími prostředky s hygienickým atestem. Po každém použití utřete židli do sucha.
- **K čištění nepoužívejte:** silné čisticí prostředky, abrazivní prostředky, bělidla, benzín ani žádná ředidla (může dojít k poškození rámu, viditelným ztrátám materiálů, a v důsledku toho ke ztrátě záručních oprávnění).
- Systematicky kontrolujte:
  - utažení motýlkových šroubů
  - stav zajišťovacích kolíků
  - stav trubek (výskyt prasklin)










Je doporučeno pravidelně kontrolovat pryžové násadky.

Dojde-li k jejich opotřebení, vyměňte koncovky za nové.

## 7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

## 8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na [www.timago.com](http://www.timago.com)

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021