

NÁVOD K OBSLUZE

Čtyřkolové hliníkové chodítko

Kód výrobku: CARBON




1. Provedení

Skládací čtyřkolové chodítko se skládá z hliníkového rámu natřeného barvou s metalickým leskem. Je vybaveno širokým polstrovaným sedákem a měkkým opěradlem a košíkem. Je vybaveno výškově nastavitelnými madly s anatomickými držáky na koncích a brzdami s parkovacím blokováním. Chodítko je vybaveno úzkým koly o průměru 8".

Součásti chodítka:

- a. madlo
- b. brzda
- c. fixační šroub
- d. brzdová lanka
- e. opěradlo
- f. fixační kolík
- g. příčník
- h. závěs příčníku
- i. košík
- j. vrchní nastavování brzdy

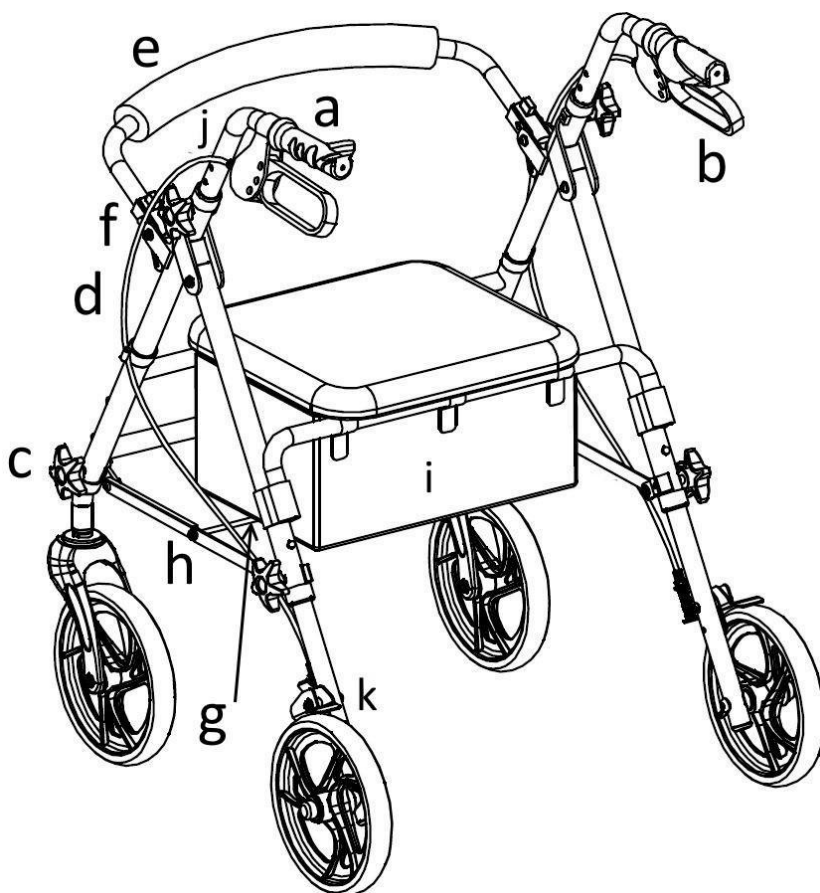

k. spodní nastavování brzd


2. Použití

Čtyřkolové chodítko je pomůcka určená pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují stabilní oporu a jištění při chůzi. Je doporučováno také starším lidem jako pomůcka pro udržení rovnováhy, zvýšení komfortu při pohybu a pro ochranu před pádem. Používání chodítka má pozitivní vliv na návrat osob s pohybovými problémy a problémy s vertikalizací k aktivitě. Zaručuje lepší stabilitu, oporu a bezpečnost při chůzi.

3. Montáž a nastavení chodítka

Montážní díly:

- A. Rám chodítka
- B.1 Levá zadní noha
- B.2 Pravá zadní noha
- C.1 Levé madlo
- C.2 Pravé madlo
- D.1 Levá přední noha
- D.2 Pravá přední noha
- E. Fixační šrouby
- F. Opěradlo

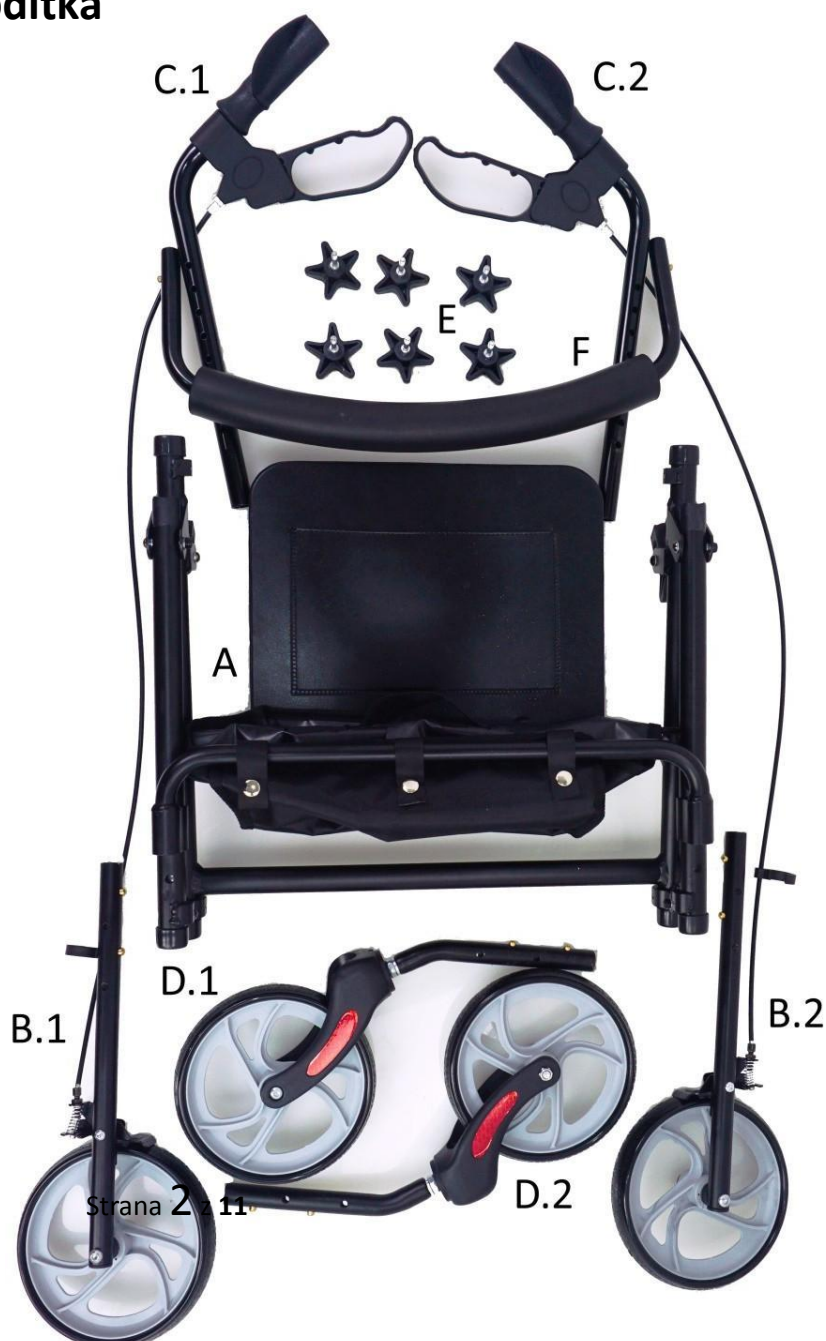

Montáž

- Rozložte rám chodítka (A) tak, že rozevřete na plocho oba závěsy příčnicku (vyčnívající fixační prvky opěradla jsou vpředu na rámu/chodítku).
- Vložte levou zadní nohu (B.1) do levého zadního otvoru rámu stlačením fixačního kolíku (kolečko směřuje ven). Zafixujte kolík v otvoru rámu (v rámu jsou dva otvory) podle požadované výšky chodítka. Zajistěte nohu utažením fixačního šroubu (E).
- Levá zadní noha (B.1) je spojená brzdovým lankem s levým madlem chodítka (C.1). Vložte levé madlo do levého otvoru rámu a nastavte madlo do požadované výšky. Brzdové lanko ved'te vně a upevněte v plastové vodící liště na rámu. Zajistěte madlo utažením fixačního šroubu (E).
- Obdobně namontujte pravou zadní nohu (B.2) a pravé madlo (C.2) a nezapomeňte utáhnout fixační šrouby (E).
- Vložte levou přední nohu (D.1) do levého předního otvoru rámu stlačením fixačního kolíku. Zafixujte kolík v otvoru rámu (rám má dva otvory) podle požadované výšky chodítka. Zajistěte nohu utažením fixačního šroubu (E). Pozor, všechny čtyři nohy musí být namontovány ve stejné výšce.
- Obdobně namontujte pravou přední nohu (D.2) a nezapomeňte utáhnout fixační šrouby (E).
- Namontujte opěradlo (F) zacvaknutím obou fixačních kolíků.

Rozložení a složení chodítka

- Pokud chcete chodítko složit, zvedněte sedák a zatáhněte za

příčnick, který je pod košíkem, a pak složte rám chodítka.

- Pokud chcete chodítka rozložit, rozložte rám a zatlačte příčnick, který je pod košíkem, až se závěsy příčnicku zcela rozevřou. Pak sklopte sedák.

Funkce brzd

- Pokud chcete chodítka zastavit, přitáhněte páčku brzdy nahoru k madlu a přidržte ji.
- Při stání nebo sezení na sedáku zajistěte brzdu parkovací zarážkou zatažením za brzdovou páčku dolů.
- Pro uvolnění brzdy přitáhněte páčku brzdy nahoru.

Nastavení výšky madel

Pro nastavení výšky madel uvolněte fixační šrouby, které jsou na vnější straně rámu, zvolte požadovanou výšku trubky a znovu utáhněte fixační šrouby.

Pozor! Madla nastavte na stejnou výšku.

Nastavení brzd

Vrchní nastavování brzdy: Odšroubujte držák lanka, přitáhněte lanko na požadovanou délku a zajistěte utažením fixačního šroubu.

Dolní nastavování brzdy: Uvolněte fixační šroub plochým klíčem, tahem za černé brzdové lanko nastavte jeho napnutí a pak utáhněte fixační šroub.

4. Technická specifikace

Šířka celkem	64 cm
Délka celkem	66,5/72 cm

Šířka sedáku	45 cm
Výška celkem	77-95 cm
Výška sedáku od podložky	49,5/54,5 cm
Hmotnost	7,2 kg
Max. nosnost	100 kg
Max. nosnost košíku	5 kg
Barva rámu	černá

5. Upozornění a doporučení

Společnost Timago International Group nenesse odpovědnost za nesprávné používání chodítka, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které je v rozporu s účelem.

6. Údržba

K čištění rámu použijte vlhký hadřík, rám pak důkladně osušte. Nepoužívejte agresivní leštící prostředky, neboť tím může dojít ke zničení ochranných vrstev. Průběžně odstraňujte nečistoty z pohyblivých součástí chodítka (závěsů, blokovacích šroubů, blokování).

7. Podmínky skladování a dopravy

Výrobek chraňte před přímým sluncem, vodou a vlhkostí.

8. Záruka

Na výrobek je poskytována záruka, jejíž podmínky jsou specifikovány v záručním listu, který jste obdrželi. Pro případné uplatnění záruky si ponechte doklad o koupi (účtenku nebo fakturu).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem



Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických prostředků.

Celá nabídka je k dispozici u našich distributorů. Více informací na
www.timago.com

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!

POZNÁMKY:



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



I. vydání, datum aktualizace 10.09.2021