



Predajca: Invira s.r.o.

Telefón: +420 605 942 335

Email: info@invira.cz

Adresa: Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, Česká republika

IČO: 29446287

DIČ: CZ29446287

NÁVOD A POKYNY NA ÚDRŽBU

Antidekubitná tlaková pumpa SY-B kód RA7573299 a bublinová matrac MB-300 kód RA7573301

POKYNY NA POUŽÍVÁNIE:

Vážený zákazník, produkt, ktorý sa chystáte používať, je zdravotnícka pomôcka. Tlaková pumpa striedavo mení tlak v bublinách matraca, čím pomáha predchádzať vzniku prvého štádia preležanín. Pomôcka je vhodná na dlhodobú liečbu a domáce použitie. Prístroj znižuje tlak na pokožku a jemnou masážou zlepšuje prietok krvi a okysličenie tkanív.

PRED POUŽITÍM:

1. Po otvorení balenia skontrolujte neporušenosť zariadenia. Zvláštnu pozornosť venujte poškodeniu plastových častí, ktoré by mohli odkryť živé elektrické časti. V takom prípade prístroj nepoužívajte.
2. Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či elektrické údaje na typovom štítku a typ konektora zodpovedajú parametrom elektrickej siete, do ktorej sa má zapojiť.
3. Uchovávajte mimo dosahu detí.
4. V prípade poruchy sa okamžite obráťte na predajcu.
5. Výrobca nezodpovedá za nesprávne používanie zariadenia.
6. Táto zdravotnícka pomôcka je určená výhradne na účel, na ktorý bola navrhnutá. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, viditeľne porušené, po páde alebo zasiahnuté vodou. Nedodržiavanie pravidiel môže ohroziť bezpečnosť zariadenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte výrobcu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí, v prítomnosti anestetických plynov, horľavých látok alebo v blízkosti tekutín, ktoré by mohli preniknúť do zariadenia.

SYMBOLY:



Postupujte podľa pokynov



Návod obsahuje užitočné rady k používaniu



Všeobecná poznámka

| ON (Zapnuté)

O OFF (Vypnuté)



Zariadenie typu BF podľa normy IEC 60601-1



Prúd vzduchu



Likvidácia odpadu podľa smernice 2002/96/CE a jej aktualizácií



Dvojitá izolácia

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

1. Umiestnite čerpadlo vodorovne alebo ho zavesíte na nohy postele pomocou špeciálnych ramienok pod prístrojom.
2. Nafukovaciu bublinovú matrac vždy položte na klasickú matrac a dbajte na to, aby hadice neboli skrútené alebo zlomené. Prečnievajúce konce matraca zastrčte pod klasickú matrac.
3. Pripojte tlakové čerpadlo a stlačte tlačidlo ON. Otáčavým gombíkom nastavte prietok vzduchu na maximálnu hodnotu. Po 20 minútach by mala byť matrac pripravená.
4. Vždy používajte plachtu alebo ochranný poťah medzi nafukovacou bublinovou matracou a pacientom.
5. Nastavte tlak pomocou regulačného gombíka na tlakovej pumpe podľa hmotnosti pacienta, aby bolo dosiahnuté maximálne pohodlie.

ROZSAH PRIETOKU VZDUCHU PODĽA HMOTNOSTI:

- Do 50 kg: pozícia 1–2
- 50–65 kg: pozícia 3–4
- 65–85 kg: pozícia 5–7
- 85–100 kg: pozícia 8–10

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Klasifikačný systém (Dir. 93/42/EEC): zdravotnícke zariadenie trieda I

Tlaková pumpa SY-B

Výrobca: RICANT SNC

Kód produktu: RA7573299

Napájacie napätie: 230 V AC, 50 Hz

Prúd vzduchu: 5 l/min

Rozsah tlaku: 40 – 100 mmHg

Doba cyklu: 8 minút

Spotreba energie: 10 W

Bezpečnostná trieda: II

Krytie: externá poistka F500 mA

Rozmery: 265 mm (dĺžka) x 125 mm (šírka) x 105 mm (výška)

Hmotnosť: cca 1,4 kg

Vyrobené: Čína

Bublinová matrac MB-300

Výrobca: RICANT SNC

Kód produktu: RA7573301

Rozmery: 200 x 88 x 7 cm + 90 cm okraje

Počet buniek (bublín): 130

Materiál: PVC podľa normy CE, hrúbka 30 mikrónov

Farba: béžová

Hmotnosť: cca 2,3 kg

Nosnosť: pre pacientov od 30 do 100 kg

Vyrobené: Čína

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Prevádzková teplota: 10°C – 35°C Vlhkosť: 20% – 80% RH

SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY:

Teplota: -15°C – 50°C Vlhkosť: 10% – 90% RH

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Zariadenie nevyžaduje špeciálnu údržbu.

Na čistenie matraca používajte neutrálny čistiaci prostriedok, vlhkú handričku alebo dezinfekčný prostriedok. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli matrac poškodiť.

Na čistenie tlakovej pumpy nepoužívajte príliš mokrú handričku a vyhnite sa čistiacim prostriedkom.

UPOZORNENIE: Všetky čistiace a údržbové práce vykonávajte až po odpojení kompresora od elektrickej siete.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

- **Zariadenie nefunguje:** Skontrolujte pripojenie k elektrickej sieti a poistku.
- **Matrac sa nedá nafúknuť:** Skontrolujte správne prepojenie hadíc a odstráňte prípadné prekážky vzduchu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Produkt má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Počas záručnej doby poskytuje predajca bezplatnú opravu alebo výmenu poškodených súčiastok. Záručné opravy nepredlžujú záručnú dobu. Výrobca nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym použitím, úpravami, nedbalosťou alebo neodbornou manipuláciou. Záruka zaniká, ak je výrobné číslo odstránené, poškodené alebo pozmenené. Náklady na opravy alebo výmeny, ktoré nie sú kryté zárukou, hradí zákazník.